



Oftalmologia | Dispositivos Médicos | Anti-edema

ocular®

Substância activa

Cloreto de sódio a 5%

Apresentação

Solução oftálmica sem conservantes – Frasco de 10 ml

Indicações Terapêuticas

Ocular® é utilizado para o tratamento do edema da córnea e, pelas suas propriedades físico-osmóticas, para a remoção do líquido em excesso, melhorando a visão. Ocular® está especialmente indicado no pós-operatório de cirurgias oculares (ex. cirurgia às cataratas) e após intervenções oftalmológicas de diagnóstico (ex. gonioscopia), caso ocorra um desequilíbrio no balanço osmótico do tecido da córnea.

Posologia

Para abrir o frasco, retire a anilha de segurança puxando-a pela sua extremidade até que seja completamente removida. Retire a tampa puxando-a para cima. Incline ligeiramente a cabeça para trás, olhe para cima e afaste, delicadamente, a pálpebra inferior do olho. Mantenha o frasco virado para baixo e aplique uma gota no saco conjuntival do olho, através de pressão firme e prolongada, 3 a 5 vezes ao dia. Feche o olho lentamente para permitir uma distribuição uniforme do líquido na superfície do olho. Feche o frasco pressionando ligeiramente a tampa.

Ocular® é um Dispositivo Médico

Fabricante: Penta Arzneimittel GmbH, VWerksstrasse 3, 92551 Stulln – Alemanha