



Oftalmologia | Dispositivos Médicos | Secura ocular

opticol® GL monodoses

Substância activa

Hialuronato de sódio (0,30%), cloreto de sódio, hidrogenofosfato de sódio, dihidrogenofosfato de sódio, água para preparações injetáveis.

Apresentação

Solução oftálmica sem conservantes – Unidades 30 x 0,35 ml

Indicações Terapêuticas

Opticol® GL permite obter um alívio prolongado do desconforto associado a:

- Stress mecânico, provocado por exemplo, pelo uso de lentes de contacto rígidas ou moles, ou durante intervenções de diagnóstico oftálmico.
- Condições de stress ambiental provocadas, nomeadamente, pela ação do ar condicionado, do vento, do frio, secura ou poluição do ar provocada por exemplo pelo fumo dos cigarros.
- Stress visual causado pelo uso intensivo da visão devido, por exemplo, à utilização de computadores, microscópios ou durante a utilização prolongada de veículos motorizados.

Posologia

Separe uma monodose. Certifique-se que a monodose se encontra intacta. Abra a monodose torcendo progressivamente a parte achatada da monodose/tampa (não puxe). Incline a cabeça ligeiramente para trás, olhando para cima. Puxe a pálpebra inferior ligeiramente para baixo e aplique uma gota no saco conjuntival do olho 3 a 5 vezes ao dia. Feche o olho lentamente para permitir uma distribuição uniforme do líquido na superfície do olho.

Opticol® GL Monodoses é um Dispositivo Médico

Fabricante: Penta Arzneimittel GmbH, VWerksstrasse 3, 92551 Stulln – Alemanha