



Oftalmologia | Dispositivos Médicos | Secura ocular

opticol® OSD

Substância activa

Hialuronato de sódio 0,15%, cloreto de sódio, citrato de sódio, ácido cítrico, água para preparações injetáveis.

Apresentação

Solução oftálmica sem conservantes – Frasco de 10 ml

Indicações Terapêuticas

Opticol® OSD permite obter um alívio prolongado do desconforto associado a:

- Stress mecânico, provocado por exemplo, pelo uso de lentes de contacto rígidas ou moles, ou durante intervenções de diagnóstico oftálmico.
- Condições de stress ambiental provocadas, nomeadamente, pela ação do ar condicionado, do vento, do frio, secura ou poluição do ar provocada por exemplo pelo fumo dos cigarros.
- Stress visual causado pelo uso intensivo da visão devido, por exemplo, à utilização de computadores, microscópios ou durante a utilização prolongada de veículos motorizados.

Posologia

Para abrir o frasco, retire a anilha de segurança puxando-a pela sua extremidade até que seja completamente removida. Retire a tampa puxando-a para cima. Incline ligeiramente a cabeça para trás, olhe para cima e afaste, delicadamente, a pálpebra inferior do olho. Mantenha o frasco virado para baixo e aplique uma gota no saco conjuntival do olho, através de pressão firme e prolongada, 3 a 5 vezes ao dia. Feche o olho lentamente para permitir uma distribuição uniforme do líquido na superfície do olho. Feche o frasco pressionando ligeiramente a tampa.

Opticol® OSD é um Dispositivo Médico

Fabricante: Penta Arzneimittel GmbH, VWerksstrasse 3, 92551 Stulln – Alemanha